

CITROSTERIL STERILFERRI New Dispositivo Medico disinfettante di classe IIB

Proprietà: CITROSTERIL STERILFERRI New è un disinfettante pronto all'uso a base di glutaraldeide acida per la disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili. Presenta uno spettro d'azione completo verso: batteri, miceti e micobatteri, la sua reazione acida consente la stabilità del principio attivo nella forma libera. Compatibile con i materiali lavabili e facilmente sciacquabile, non corrode i metalli e non deteriora la gomma. Idoneo per impiego manuale o con ultrasuoni.

Campi di impiego: Per la disinfezione a freddo di dispositivi medici quali ferri chirurgici (inclusi quelli di impiego odontoiatrico), strumenti a fibre ottiche, tubi respiratori, apparecchi di anestesia, dispositivi medici riutilizzabili termosensibili.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	liquido
pH	5,0±0,5
densità a 20° C	1,070
solubilità	completa in acqua

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono: 2 grammi di Glutaraldeide, coformulanti ed acqua q.b. a 100 g

Modalità d'Impiego

CITROSTERIL STERILFERRI New è pronto all'uso.

Si raccomanda di immergere completamente gli strumenti da disinfettare nella soluzione dopo averli accuratamente lavati ed asciugati. Conservare la soluzione in vasca coperta.

Tempi di contatto:

Disinfezione in immersione: minimo 10 minuti.

Una volta completato il trattamento, rimuovere i dispositivi asetticamente, risciacquarli abbondantemente ed asciugarli.

In ogni caso leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte pertinente alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione. Non immergere oggetti in acciaio al carbonio per oltre 24 ore.

Modalità di conservazione

Conservare i contenitori chiusi, al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperta, la confezione di CITROSTERILSTERILFERRI New può rimanere attiva per 12 settimane purché conservata chiusa ed al riparo da fonti di calore.

Avvertenze:

Prima dell'impiego leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza.

Prodotto ad uso professionale: utilizzato da personale specializzato con appropriati dispositivi di protezione.

Confezioni

FM0277 Flacone da 1 Litro



Fabbricante

Mondial snc - 35010 Limena (Padova) via Don Gaspare Zonta ,3 049768712- Fax 049769497

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

SANITAS Laboratorio chimico farmaceutico srl – via Emilia 168- int A –Tortona (AL) - 0131822340

